

## **RxGlaze<sup>®</sup>**

Glazura fotopolimerizabil pentru compozite

### **COMPOZIȚIA:**

**RxGlaze<sup>®</sup>** este un prepolimer lichid care conține structuri organice (dimetacrilat diuretan, metacrilat hidroxietil) și substanțe suplimentare (foto inițiator, catalizator, stabilizator). Polimerizarea prin radicalii liberi fiind activată de razele UV (400-500nm).

### **INDICAȚII:**

**RxGlaze<sup>®</sup>** este un produs prevăzut pentru lustruirea suprafeței compozitelor.

Oferă un luciu natural suprafeței lucrării din compozit, o protejează pentru o perioadă de câteva luni față de pierderea de culoare.

### **FOLOSEȘTE LA:**

Lucrari de protezare de tip Onlay

Construcția de coroane și punți din compozit

Construcția de șine pentru stabilizarea dinților mobili sau au suportat traumatisme

Reconstrucții mari de dinți

Restaurări

Finalizarea reparației lucrării protetice cu ajutorul compozitului

### **MOD DE UTILIZARE:**

Suprafața lucrării protetice trebuie să fie curățată și uscată foarte bine înainte de a fi acoperită cu preparatul **RxGlaze<sup>®</sup>**. Preparatul **RxGlaze<sup>®</sup>** trebuie aplicat cu ajutorul buretelui sau al pensulei și trebuie întins uniform pe toată suprafața compozitului. **RxGlaze<sup>®</sup>** ar trebui să acopere lucrarea cu o grosime de până la 1 mm. Preparatul trebuie polimerizat aproximativ 40 de secunde.

### **CONTRAINDICAȚII:**

Nu poate fi folosit în tratarea persoanelor la care s-a constatat alergie față de compozite.

## LIMITĂRI:

Contaminarea cu sânge, salivă sau apă în timpul restaurării cavitatii afectează polimerizarea preparatului **RxGlaze**<sup>®</sup> și necesită repetarea aplicării.

Suprafața compozitului nu poate să fie perfect nivelată, preparatul **RxGlaze**<sup>®</sup> se aplică pe suprafețe rugoase.

## DEPOZITAREA:

Materialele nu trebuie păstrate la îndemâna persoanelor neautorizate.

Materialele trebuie păstrate la temperatura camerei.

Material ușor inflamabil – trebuie păstrat departe de sursele de foc.

Este obligatorie închiderea ambalajului după fiecare folosire.

## MIJLOACE DE PRECAUȚIUNE:

Feriți-vă de contactul preparatului **RxGlaze**<sup>®</sup> cu ochii, pielea și țesuturile moi ale cavității bucale.

Nu se recomandă a fi utilizat în cazul alergiei la compozite.

În cazul în care alergia apare după aplicare, înlăturați restaurarea.

## GARANȚIA:

Firma DENTAL LIFE SCIENCES garantează cea mai înaltă calitate a produselor sale. În cazul oricărei neconformități cu cerințele de bază, DENTAL LIFE SCIENCES va schimba produsul cu cel corect sau va rambursa contravaloarea acestuia.

ISO 9001:2008

ISO 13485:2003

Instrucțiunea nr 2

în vigoare începând cu  
data de 15.02.2008

## MANUFACTURER

DENTAL LIFE SCIENCES (mfg) LTD

Pierre Fauchard House UNIT 22

Wigan Enterprise Park, Ince, Wigan WN2 2LE

United Kingdom

[www.rxdls.co.uk](http://www.rxdls.co.uk)



DENTAL LIFE SCIENCES