

BOSTON

GLAZURA 3 ml

GLAZURA DO KOMPOZYTÓW



ARKONA

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

BOSTON GLAZURA służy do uzyskania charakterystycznego dla zębów potysku i gładkości wszystkich rodzajów rekonstrukcji. Ma zastosowanie dla materiałów chemo- i światłoutwardzalnych, a także glosjonomerów w pracach takich jak: wypełnienia, inlay/onlay, korony, mosty oraz szyny do stabilizacji zębów. Ma szczególne zastosowanie jako ostatnia warstwa w przypadku prac protetycznych wykonanych z kompozytów do uzupełnień stałych.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Przygotowanie powierzchni do założenia BOSTON GLAZURY nie wymaga użycia systemu wiążącego.
2. Oczyszczyć i osuszyć powierzchnie przeznaczone do glazurowania. W przypadku powierzchni bardzo zabrudzonych użyć WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO. Stosowanie BOSTON GLAZURY nie wymaga uprzedniego wygładzenia pracy. BOSTON GLAZURA umożliwia uzyskanie gładkich i błyszczących powierzchni bez potrzeby ich mechanicznego polerowania.
3. Równomiernie rozprowadzić BOSTON GLAZURĘ na całej powierzchni pracy. W przypadku nałożenia warstwy powyżej 0,5 mm rekonstrukcja może zmienić kolor na bardziej żółty.
4. Naświetlać wg Tabeli polimeryzacji.

TABELA POLIMERYZACJI BOSTON GLAZURY

Lampa	Czas naświetlania
Halogen/LED (500-800 mW/cm ²)	40 s
LED (>800 mW/cm ²)	30 s

SKŁAD

Mieszanka żywic dimetakrylanowych (BisGMA, BisEMA, HEMA) z dodatkiem katalizatorów, inhibitorów, układu fotoinicjującego (CQ: DMAEMA).

BOSTON GLAZURA utwardzana jest na drodze polimeryzacji wolnorodnikowej aktywowanej światłem widzialnym z zakresu niebieskiego (400–500 nm).

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować BOSTON GLAZURY u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników materiału.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane BOSTON GLAZURY nie są znane, jednakże u osób szczególnie wrażliwych nie można wykluczyć wystąpienia objawów uczulenia. W przypadku wystąpienia natychmiastowej reakcji alergicznej, zaprzestać stosowania produktu. W przypadku wystąpienia późnej alergii wymienić rekonstrukcję.

OGRANICZENIA W STOSOWANIU, INTERAKCJE

Nie stosować w przypadku, gdy niemożliwa jest całkowita izolacja pracy od śliny, wilgoci czy krwi. Zanieczyszczenia mogą zaburzać polimeryzację.

Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatami zawierającymi związki fenolowe, zwłaszcza eugenol lub tymol. Związki te mogą zaburzać polimeryzację BOSTON GLAZURY.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikać kontaktu niespolimeryzowanego materiału ze skórą, tkankami miękkimi jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu przepłukać dużą ilością wody. W razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem podając informacje o produkcie. Aby zminimalizować ryzyko kontaktu przez cały czas należy nosić osobiste wyposażenie ochronne, takie jak rękawiczki, maski na twarz i okulary ochronne.

W przypadku połknięcia lub zaaspirowania produktu do układu oddechowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W celu izolacji pola zabiegowego oraz ochrony pacjenta, zaleca się stosowanie koferdamu.

Należy zadbać o prawidłowe naświetlanie lampą polimeryzacyjną, szczególnie w miejscach trudno dostępnych. Upewnić się, że podczas polimeryzacji cała warstwa BOSTON GLAZURY jest penetrowana przez światło. BOSTON GLAZURA niespolimeryzowana całkowicie może być alergizująca dla pacjenta. W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia niespolimeryzowanej BOSTON GLAZURY należy usunąć zanieczyszczoną warstwę materiału i położyć następną naświetlając ją prawidłowo.

Należy unikać zanieczyszczenia powierzchni butelki i zakraplacza (ryzyko zakażeń krzyżowych).

Celem uniknięcia przypadkowej polimeryzacji BOSTON GLAZURY należy zamknąć butelkę natychmiast po użyciu.

OSTRZEŻENIA

 Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych. Chronić przed światłem. Polimeryzacja BOSTON GLAZURY może się rozpocząć w świetle otoczenia. Chronić przed przegrzaniem. Nie zamrażać. Używać zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używać po upływie terminu ważności.

PRZECZYSZCZANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych.

GWARANCJA

Firma ARKONA wymienia produkty lub zwraca koszt ich zakupu w przypadku wystąpienia potwierdzonej wady. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem materiału.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.02.2020 r.