


MASTERBOND


STOMATOLOGICZNY SYSTEM WIĄŻĄCY



ARKONA

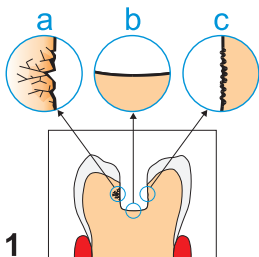


Starannie opracuj ubytek. Kompozyt bardzo dobrze przykleja się jedynie do prawidłowej struktury szkliwa i zębiny (b) - odkleja się natomiast od próchnicy (a). Dokładne wygładzenie całych ścianek ubytku zapewnia prawidłową siłę utrzymania wypełnienia i zabezpiecza przed jego utratą w wyniku odkruszenia się mikronierówności (c) podczas żucia pokarmów.

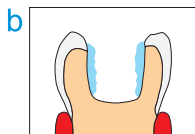

Wytraw przy użyciu WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO całą powierzchnię ubytku (a) (można pominąć jedynie najgłębsze części (b) - kompozyt nie łączy się ze zdemineralizowaną tkanką). Wypłucz i delikatnie osusz.

TABELA POLIMERYZACJI

Lampa	Czas naświetlania
Halogen/LED (500-800 mW/cm ²)	15 s
LED (800-1200 mW/cm ²)	10 s

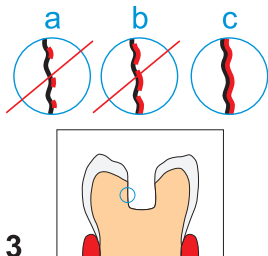

Dokładnie pokryj ubytek systemem wiążącym MASTERBOND wcierając go starannie przez kilka sekund. Doprowadź do całkowitego pokrycia ścianek ubytku systemem wiążącym, co zapewni optymalną adhezję kompozytu do zęba: a, b – niewystarczająco, c – prawidłowo.

Wydmuchaj nadmiar systemu wiążącego. Naświetlaj wg Tabeli polimeryzacji.

WSKAZANIA

Stomatologiczny system wiążący MASTERBOND służy do: łączenia twardych tkanek zęba z wypełnieniami kompozytowymi, uszczelnienia szczeliny brzęznej, niwelowania skurczu polimerizacyjnego, przygotowania powierzchni prac protetycznych przed ich zacementowaniem kompozytowymi cementami podwójnego utwardzania.

SKŁAD

Mieszanina żywic dimetakrylanowych (BisGMA, HEMA, BisEMA) z dodatkami alkoholu etylowego, katalizatorów, inhibitorów, układu fotoinicjującego (CQ: DMAEMA).

MASTERBOND utwardzany jest na drodze polimerizacji wolnorodnikowej aktywowanej światłem widzialnym z zakresu niebieskiego (400–500 nm).

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować systemu wiążącego MASTERBOND u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników materiału.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane systemu wiążącego MASTERBOND nie są znane, jednakże u osób szczególnie wrażliwych nie można wykluczyć wystąpienia objawów uczulenia. W przypadku wystąpienia natychmiastowej reakcji alergicznej, zaprzestać stosowania produktu. W przypadku wystąpienia późnej alergii wymienić rekonstrukcję. W przypadkach nadwrażliwości polecane jest stosowanie podkładów głasjonomerowych lub na bazie wodorotlenku wapnia.

OGRANICZENIA W STOSOWANIU, INTERAKCJE

Nie stosować w przypadku, gdy niemożliwa jest całkowita izolacja pracy od śliny, wilgoci czy krwi. Zanieczyszczenia mogą zaburzać polimerizację, powodując spadek wytrzymałości mechanicznej i zmniejszenie trwałości rekonstrukcji.

Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatami zawierającymi związki fenolowe, zwłaszcza eugenol lub tymol. Związki te mogą zaburzać polimerizację systemu wiążącego MASTERBOND.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikać kontaktu niespolimerizowanego materiału ze skórą, tkankami miękkimi jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu przepłukać dużą ilością wody. W razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem podając informacje o produkcie. Aby zminimalizować ryzyko kontaktu przez cały czas należy nosić osobiste wyposażenie ochronne, takie jak rękawiczki, maski na twarz i okulary ochronne.

W przypadku połknięcia lub zaaspirowania produktu do układu oddechowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W celu izolacji pola zabiegowego oraz ochrony pacjenta, zaleca się stosowanie koferdamu.

Należy zadbać o prawidłowe naświetlanie lampą polimerizacyjną. System wiążący niespolimerizowany całkowicie może być alergizujący dla pacjenta.

Jeśli jakkolwiek warstwa wypełnienia została zabrudzona lub uszkodzona mechanicznie, należy jej powierzchnię delikatnie zszlifować i pokryć MASTERBONDEM przed nałożeniem kolejnej warstwy. Jeśli pokryty MASTERBONDEM ubytek został zabrudzony, powtórzyć wytrawienie i ponownie nałożyć system wiążący. W przypadku niewystarczającej polimerizacji usunąć nieprawidłowo spolimerizowaną warstwę i położyć następną naświetlając ją prawidłowo.

Należy unikać zanieczyszczenia powierzchni butelki i zakraplacza (ryzyko zakażeń krzyżowych).

Celem uniknięcia przypadkowej polimerizacji systemu wiążącego MASTERBOND należy zamknąć butelkę natychmiast po użyciu.

OSTRZEŻENIA

 Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych. Chronić przed światłem. Polimerizacja systemu wiążącego może się rozpocząć w świetle otoczenia. Chronić przed przegrzaniem. Nie zamrażać. Trzymać z dala od źródeł ognia. Używać zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używać po upływie terminu ważności.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych.

PRZECHOWYWANIE

Firma ARKONA wyłącza odpowiedzialność za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem materiału.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.02.2020 r.